

# Mölnlycke® sidosvalikoima ihorepeämien hoitoon

Ennen sidoksen asettamista, hallitse verenvuoto, puhdista haava ja aseta iholäppä takaisin ihopuutoskohtaan.

## ▶ Haavatyypit

<b>Iho vaarassa</b> Ikääntynyt iho on haavoittuvampi ja alttiimpi ihorepeämille.	<b>Tyyppi 1:</b> <b>Ei ihon menetystä</b> Suoraviivainen tai läppä repeämä, joka voidaan asettaa takaisin ihopuutoskohtaan.	<b>Tyyppi 2:</b> <b>Osittainen läpän menetys</b> Osittainen läpän menetys, jota ei voida uudelleen asettaa ihopuutoskodan peittämiseksi.	<b>Tyyppi 3:</b> <b>Täydellinen läpän menetys</b> Täydellinen läpän menetys, joka paljastaa koko haavapohjan.
			

## ▶ Suositeltu tuote

Ihoa kosteuttavat voiteet	Mepitel® One +	Mepitel® One tai Mepilex® Border Flex	Mepilex® Border Flex
	Mesoft® or Mesorb®		
		<b>tai</b>	<b>tai</b>
		Mepilex® Border Ag	Mepilex® Border Ag

## ▶ Bakteerien epätasapaino/infektio

## ▶ Kiinnitys/suojaus

	Tubifast® tai Mepitel® Film	Tubifast® tai Mepitel® Film	
<b>Hallintavinkit</b> Vältä saippuota, jotka kuivattavat ihoa. Kosteuta ihoa kosteusvoiteella kahdesti päivässä. Käytä tuotteita, jotka ovat hajusteettomia ja hypoallergeenisia.	Asettele iholäppä takaisin ihopuutoskohtaan. Mepitel® One -sidoksen tulisi olla paikallaan vähintään viiden päivän ajan, jotta läppä voi parantua alla olevaan kudokseen. Mepitel One -sidoksen päällä oleva imukykyinen sidos vaihdetaan tarpeen mukaan, jättäen Mepitel One -sidoksen paikalleen. Vaihda Mepitel One kun uudelleen epitelisointi on varmistettu.	Sidoksen asettamisen jälkeen: merkitse siihen nuolella sidoksen poistosuunta. Jos iho on erittäin herkkä: poista sidos hitaasti sen kulmasta avaten.	

## Haluatko oppia lisää?

Todella ymmärtääksesi, mitä oikeat hoitorutiinit ja tuotevalinnat voivat saada aikaan sinulle ja potilaillesi, käy osoitteessa [www.molnlycke.fi](http://www.molnlycke.fi), josta löydät ihorepeämiin liittyvän koulutusmoduulin, mikä sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen siitä miten ennaltaehkäistä, arvioida ja hoitaa ihorepeämiä. Tämä moduuli on ISTAP:n eli kansainvälisen ihorepeämien neuvoo-antavan paneelin hyväksymä. Koulutusmoduuli on englanninkielinen.

Lisätieto [www.molnlycke.fi](http://www.molnlycke.fi)

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 3. krs, 00380 Helsinki. Puhelin 0201-622-300.  
Mölnlycke, Mepilex, Mepitel, Mesoft, Mesorb, Tubifast, ja Safetac tavaramerkit, nimet ja vastaavat logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2019 Mölnlycke Health Care. Kaikki oikeudet pidätetään. FIWC0691908

  
**Mölnlycke®**