

Mepilex®

TEHOKAS IMUKYKYINEN VAAHTOSIDOS

- Minimoi kipua ja traumaa sidosten vaihdon yhteydessä^{1,2}
- Hellävarainen kiinnitysaine, joka pysyy paremmin paikoillaan ja on potilaalle miellyttävä
- Ei liu kiinnityssidoksen alla ja voidaan leikata eri kokoisiin haavoihin sopivaksi*

Safetac®

- Vähentää haavalle aiheutuvaa kipua ja traumaa ennen sidoksen vaihtoa, sen aikana ja sen jälkeen¹
- Ei kiinnity kosteaan haavapintaan, vaan kuivaan haavaa ympäröivään ihoon
- Sulkee haavan reuna-alueen ja vähentää maseraation riskiä³

Polyuretaani vaahtotyyny:

- Imee haavaeritettä
- Toimii hyvin kompressiosidoksen alla
- Miellyttävä



Polyuretaani taustakalvo:

- Hengittävä
- Vedenkestävä
- Virus- ja bakteerisuoja


Safetac® teknologia

* Mepilexia ei tarvitse leikata haavaan sopivaksi kun käytetään kompressiosidosta.


Safetac® teknologia. Vähemmän vauriota. Vähemmän kipua.

Safetac on ainutlaatuinen silikonikiinnitysteknologia. Safetac-teknologiaan perustuvat sidokset eivät aiheuta vaurioita poistettaessa. Sidoksen vähentävät vauriota haavalle ja sitä ympäröivälle iholle sekä vähentävät potilaalle aiheutuvaa kipua. Sidos kiinnittyy haavaa ympäröivään kuivaan ihoon ja maseraatoriski vähenee.

Lisätietoa www.safetac.com

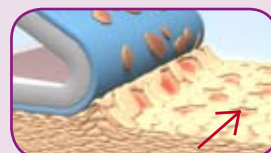


Perinteisiä kiinnitysaineita käytettäessä esiintyy ihon kuoriutumista.

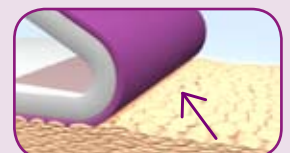

Safetac-teknologiaa käytettäessä ei esiinny ihon kuoriutumista.

Kuinka Mepilexia käytetään

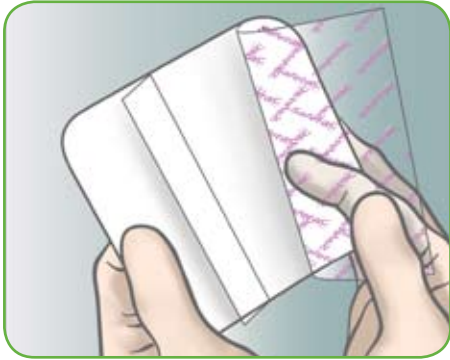

Puhdista haava ja ympäröivä alue. Poista sidoksen taustakalvo.



Mepilex tulee asettaa vähintään 2cm haava-alueen yli terveelle iholle. Aseta kiinnittyvä pinta haavaa vasten. Älä venytä sidosta paikalleen asettaessa.



Jos tarpeellista, kiinnitä Mepilex sekundäärisellä sidoksella esim. Tubifast 2-way Stretch.

Kuinka Mepilex® toimii

Mepilex on pehmeä ja erittäin miellyttävä vaahtosidos, joka imee haavaeritettä ja pitää haavaympäristön kosteana. Safetac-kerros sulkee haavan reuna-alueen, estäen eritettä vuotamasta ympäröivälle iholle, minimoiden siten maseraation riskiä. Safetac-tekniologia varmistaa, että sidos voidaan vaihtaa vahingoittamatta haavaa tai ympäröivää ihoa tai aiheuttamatta potilaalle lisäkipua.

Mepilexin edut

- Minimoi kipua ja traumaa sidosten vaihdon yhteydessä
- Pysyy paikoillaan, joten kädet vapautuvat kompressio- tai kiinnityssidoksen kiinnittämiseen, esim. Tubifast 2-way Stretch putkisidos
- Sopii käytettäväksi kompressiosidosten alla
- Voidaan leikata eri kokoihin haavoihin ja vaikeasti sidottaviin alueisiin sopivaksi
- Parantaa potilasmukavuutta käytön aikana
- Voidaan jättää paikoilleen useiksi päiviksi haavan kunnan mukaan
- Voidaan irroittaa ja kiinnittää uudelleen menettämättä kiinnitysominaisuuksia, eikä jätä jäämiä haavalle
- Alhainen iho- tai allergisen reaktion riski

Käyttöalueet

Mepilex on suunniteltu monenlaisille vähän tai kohtalaisesti erittävälle haavoille kuten: sääri- ja jalkahaavat, painehaavat ja traumaattiset haavat, esim. ihon repeämät.

HUOMIO

Jos haavassa esiintyy klinisiä merkkejä infektiosta, niin Mepilex käyttöä voidaan jatkaa, vain jos tarpeen mukainen infektiohoito on aloitettu.



MEPILEX VALIKOIMA (pakattu steriileihin yksittäispakkauksiin)

Tuotenumero	Koko cm	Kpl/osastopakk.	Kpl/kuljetuspakk.
294015	5 x 5	5	40
294100	10 x 10	5	70
294200	10 x 20	5	45
294300	15 x 15	5	25
294400	20 x 20	5	20
294500	20 x 50	2	12

MEPILEX HEEL VALIKOIMA

288100	13 x 20	5	25
288300	15 x 22	5	30